


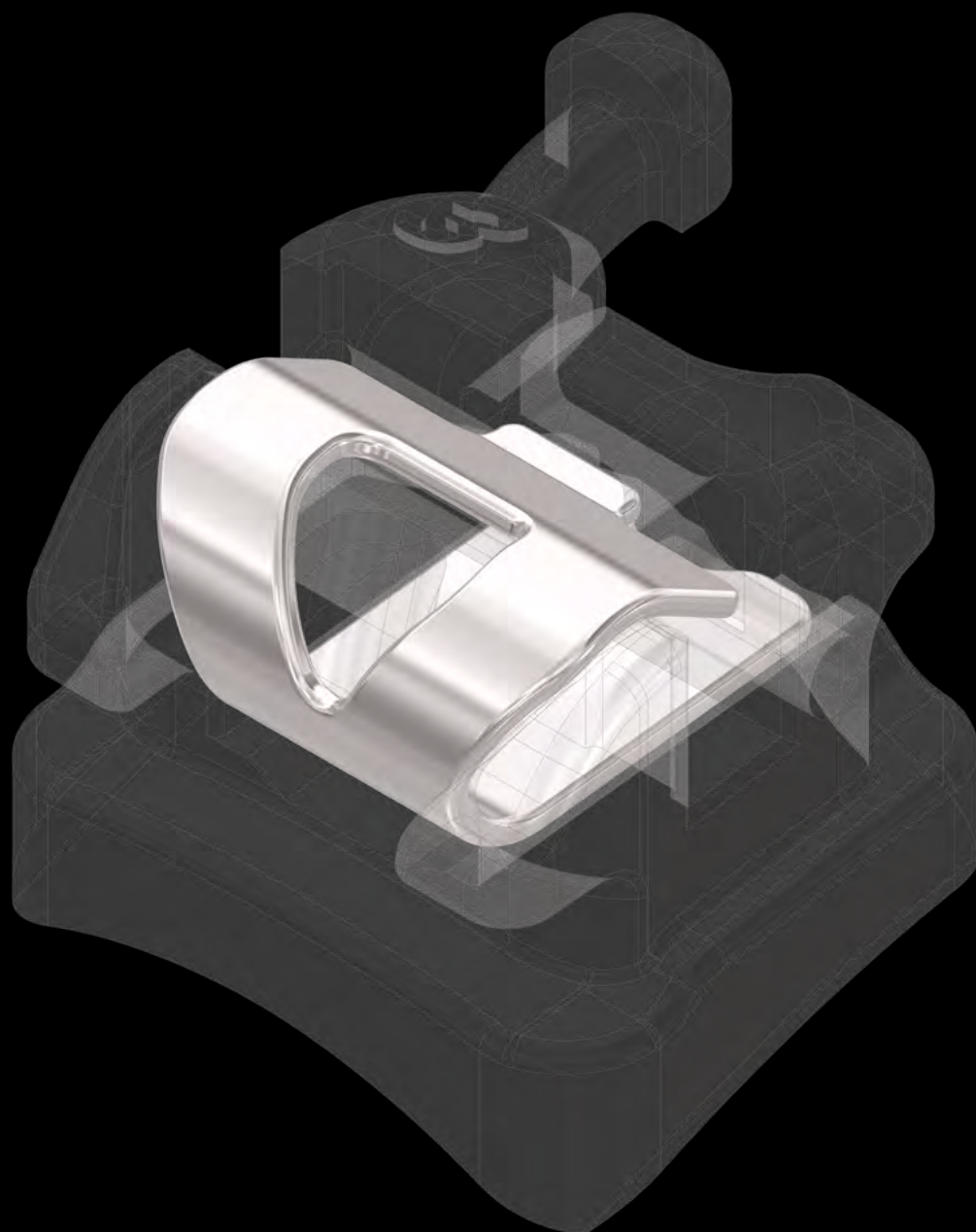

IT'S ALL ABOUT THE CLIP...

BioQuick®


Die 5. Generation

www.forestadent.com

FORESTADENT®
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS

BioQuick®

It's all about the Clip...

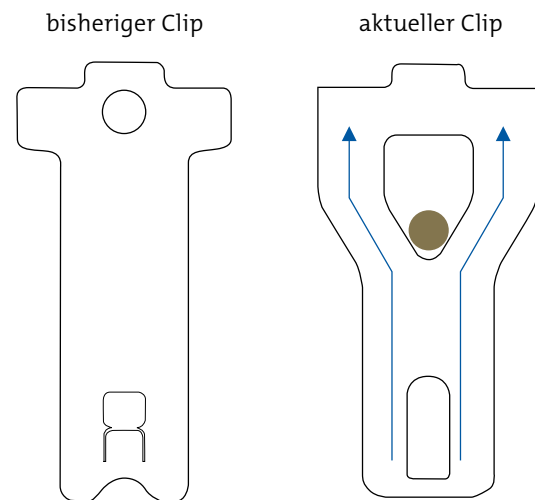


Der aktuelle Clip behält seine ursprüngliche Breite bei, wurde aber im stark beanspruchten Bereich optimiert und erweitert. Dadurch kann er mehr Kraft aufnehmen und verformt sich weniger.


Die Vorteile:

- Die größere Clip-Öffnung erlaubt ein einfacheres Öffnen mit Werkzeugen wie Sonde oder Scaler. Zudem haben wir ein neues Instrument für noch sichereres Öffnen entwickelt.
- Der Ansatzpunkt für die zum Öffnen notwendige Kraft wurde optimiert. Dadurch wird dafür weniger Kraft benötigt und gleichzeitig das Material weniger belastet.
- Das neue Clip-Design erlaubt eine größere nutzbare Slotbreite und ermöglicht damit eine bessere Rotations- und Angulationskontrolle, während das Bracket gleichzeitig kleiner wurde.
- Es gibt vier Clip-Varianten für verschiedene Bracket-Angulationen: das Bracket wird nun einfach und intuitiv entlang der Längsachse geöffnet.

Das Öffnen des neuen Clips erfolgt in Angulationsrichtung:

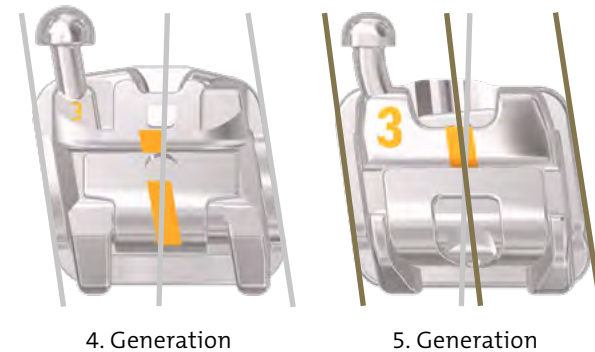

Mittenmarkierung bleibt in geöffnetem Zustand korrekt:

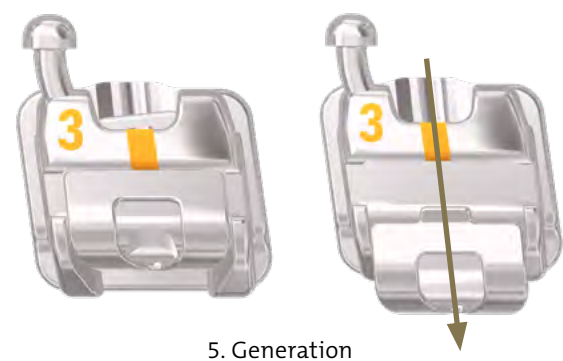

BioQuick®

Öffnungs-Möglichkeiten

Öffnungs-Möglichkeit Nr. 1:

Der Clip lässt sich mit Hilfe eines Öffnungsinstruments wie Sonde oder Scaler durch Einführen in die Clip-Öffnung und Ziehen des Clips in Angulationsrichtung öffnen.



Öffnungs-Möglichkeit Nr. 2:

Der Clip lässt sich mit Hilfe der neuen Gabelsonde durch Einführen einer der beiden Spitzen in die Clip-Öffnung und Ziehen des Clips in Angulationsrichtung öffnen. Die zweite Spitze der Sonde wirkt als Begrenzer.



Öffnungs-Möglichkeit Nr. 3:

Der Clip lässt sich mit Hilfe des neuen Öffnungsinstruments durch Einführen in den gingivalen Trichter und Drücken des Clips in Angulationsrichtung öffnen.



Bitte beachten Sie, dass das Öffnen von gingival mit dem bisherigen Öffnungsinstrument C501-1842 nicht möglich ist, da dessen Spitze zu dick für den gingivalen Trichter ist.

Unsere Instrumente für BioQuick®:

501-1845
BioQuick®
Neues Öffnungsinstrument,
zweiseitig



501-1846
Gabelsonde für BioQuick®
mit Stoppfunktion zum sicheren
Öffnen, zweiseitig



501-0861
Drahtbogen-Direktor



BioQuick®

Die größten Vorteile auf einen Blick

Neuer, überarbeiteter Clip mit großer vestibulärer Öffnung, die auch die Verwendung von Sonden oder Scalern erlaubt.

Verbesserte Kontaktrippen im Slot zur präziseren Torqueübertragung.

Der umlaufende Padrand vermindert das Überfließen von Kleber und ist mesio-distal abgeschrägt für ein einfacheres Debonding.

Hilfsslot zur Verwendung von Auxiliaries oder Doppelbogenmechaniken bis zu einer Dimension von .014".

Abgerundete Bracket- und Slotkanten sorgen für hohen Tragekomfort sowie geringe Reibung.


Bracketkörper im Einstückdesign: Hakenförmige Hinterschneidungen auf der Bracketbasis garantieren eine zuverlässige Haftung*.

*Auszug aus der Inaugural-Dissertation aus der Poliklinik für Kieferorthopädie der Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur Erlangung der Doktorwürde, vorgelegt von Christian Mihan aus Magdeburg im Juni 2012 (gekürzt und zusammengefasst von FORESTADENT. www.forestadent.com)


DIE GRÖSSTEN VORTEILE

BioQuick®


Einfache Handhabung

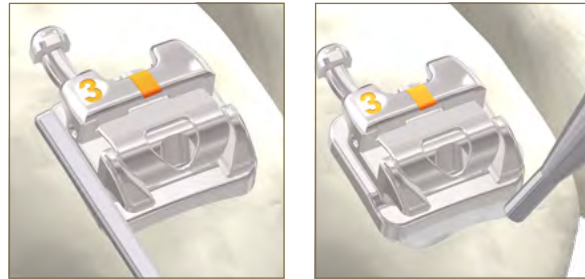


Bracket an der gingivalen Kante ansetzen und andrücken. Eventuell überquellenden Kleber vom Padrand entfernen.

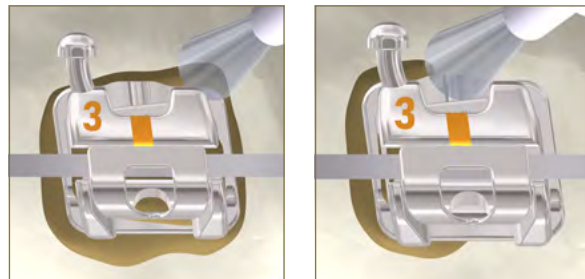

Reinigen Sie die Brackets vor dem Bogenwechsel.

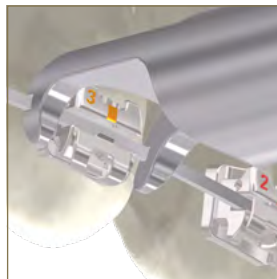

Bogen sorgfältig im Slotgrund halten bevor die Klammer durch sanften Fingerdruck geschlossen wird.

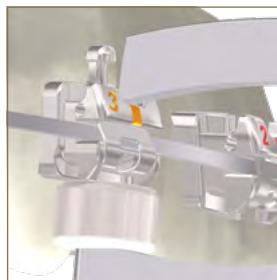

Die Brackets werden mit Hilfe einer Bandentfernungszange entfernt.



Alle Bestellinformationen zu BioQuick® in der jeweiligen Prescription.

BioQuick®

Vom Beginn bis zur heutigen 5. Generation

2005 – Quick®

- Vorstellung bei der 78. Jahrestagung der DGKFO und DGZMK in Berlin 26. – 30. Oktober 2005
- Klammergeneration 8

2008 – Quick® 2.0

- Klammergeneration 10
- Verbesserung der Klammerfunktion
- Weniger Eckenradius
- Verlängerung unterer Klammerschenkel
- Verbesserung Klammerführung

2011 – BioQuick®


- 2 Bracketfamilien: aktiv und passiv
- Verbesserung gingivales Öffnen
- Neugestaltung der Basiswölbung aufgrund der Ergebnisse unserer Vermessungsstudie (4.000 Zähne) → Zusatz „Bio“

2014 – BioQuick® 4. Generation

- Flachere Bauweise (low profile)
- Verrundete labiale Kontur für besseren Tragekomfort
- Stärkerer (dickerer) Clip mit angepassten Flügeln
- Verbesserte gingivales Öffnen (Padüberstand gingival)

2023 – BioQuick® 5. Generation

- Vollständig neues Clipdesign
- Größere nutzbare Slotlänge bei gleichzeitiger Verkleinerung der okkluso-gingivalen und mesio-distalen Abmessungen

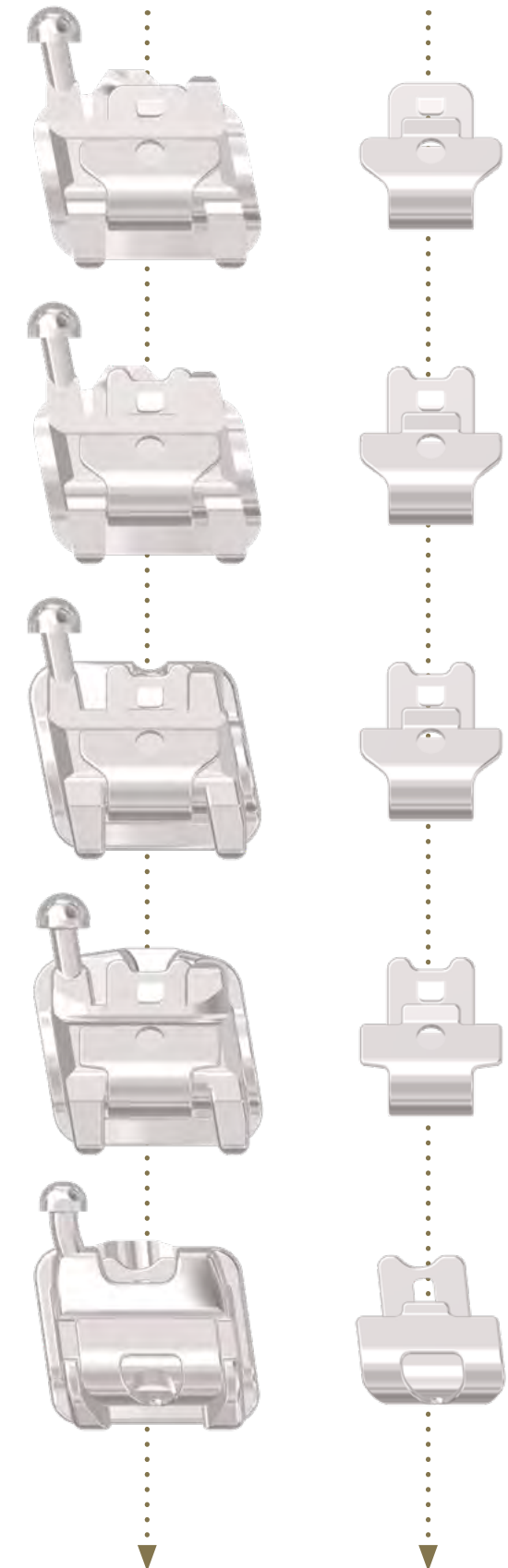

FORESTADENT
Bernhard Förster GmbH
Westl. Karl-Friedrich-Str. 151
75172 Pforzheim
Telefon: +49 (0) 7231 459-0
Fax: +49 (0) 7231 459-102
www.forestadent.com
info@forestadent.com

 **FORESTADENT®**
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS