


# *Perfektion*

*bis ins kleinste Detail*

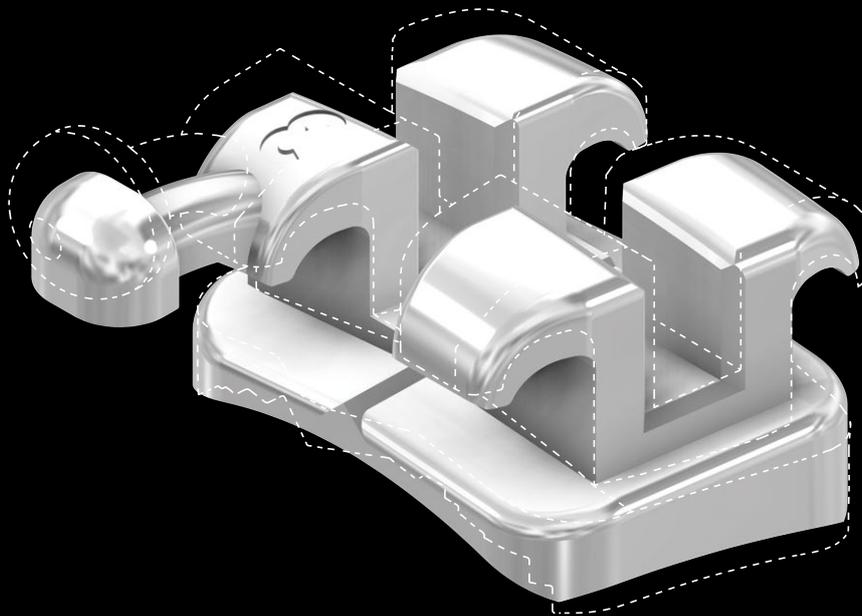


## *FACE Evolution II System*

*Mini Sprint® II Brackets – Die Neuheit in der FACE Familie*

# Die Vorteile auf einen Blick

Die zweite Generation unseres beliebten konventionell ligierbaren Klassikers hat eine Designoptimierung erfahren, die so nah am Puls modernster Kieferorthopädie ist, dass sie kaum noch Wünsche offen lässt. Sowohl Behandler als auch Patienten profitieren von einem Bracket für allerhöchste Ansprüche, dessen Handling und Tragekomfort einfach nur begeistern.

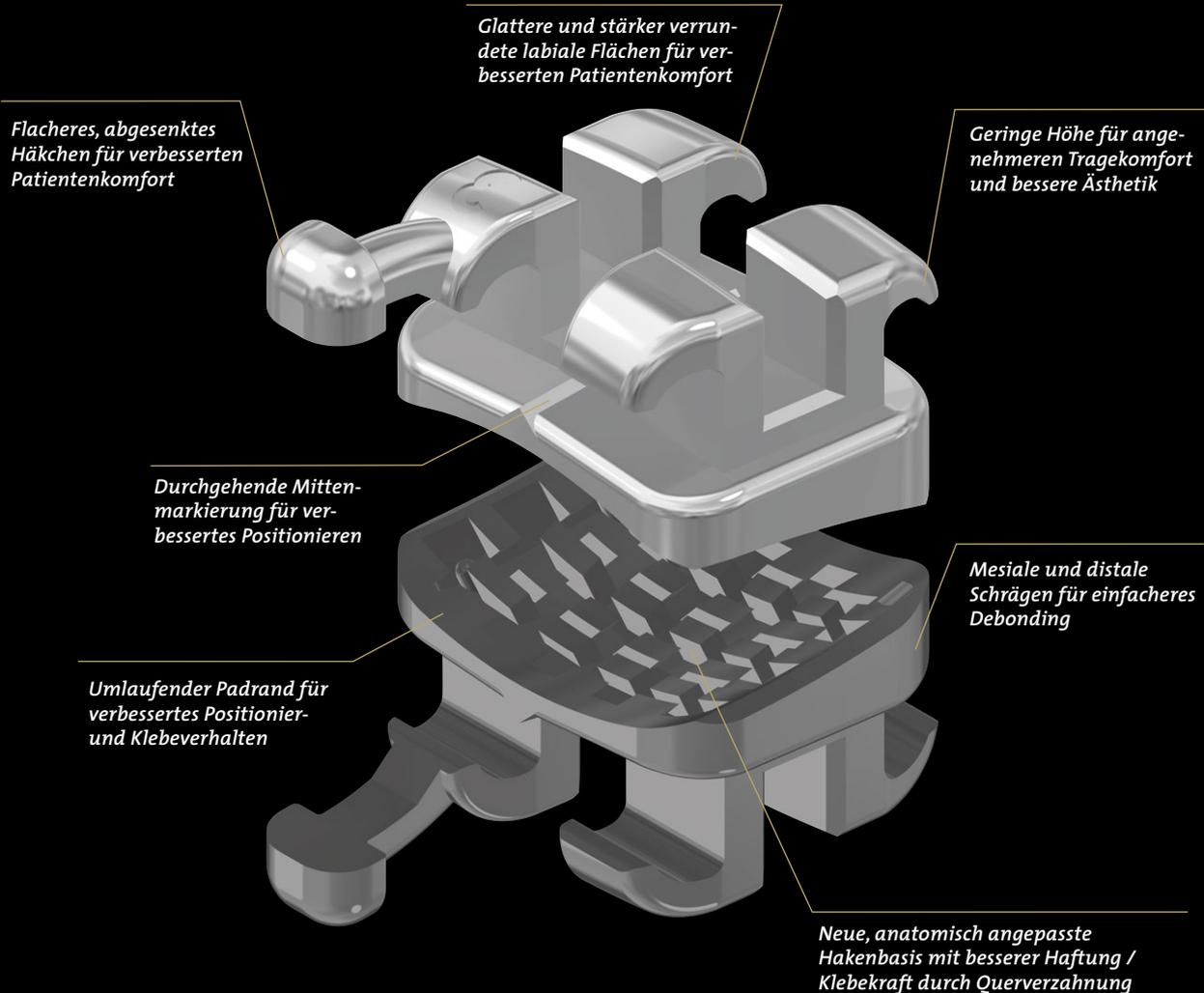

## Effektive Kieferorthopädie beginnt beim Brackethandling

Für den Behandler erweisen sich gleich mehrere Neuerungen von großem Vorteil. So wurde das Mini Sprint® II mit FORESTADENTS anatomisch gewölbter Hakenbasis ausgestattet. Diese passt sich noch besser der natürlichen Zahnkontur an und ermöglicht aufgrund ihrer integrierten Querverzahnung eine optimale Haftung.

Die neu integrierte durchgehende Mittenmarkierung dient dem Anwender als Orientierungs- und Setzhilfe und der umlaufende Rand des Klebepads sorgt zudem für ein besseres Positionierungs- und Klebeverhalten des Brackets. Ist das Therapieende erreicht, gewährleisten mesiale und distale Schrägen am Klebepad ein sicheres Ansetzen der Debondingzange und somit ein rasches Entfernen der Behandlungsapparatur.

## Für jeden Patienten der komfortable Begleiter im Alltag

Wer Brackets im Mund trägt, sollte sie möglichst kaum wahrnehmen. Damit dies gelingt, haben wir das Mini Sprint® II nicht nur flacher gestaltet, sondern auch die labialen Flächen des Bracketkörpers noch stärker verrundet. Auch das Design des Häkchens, welches für den optionalen Einsatz von Gummizügen dient, wurde mit der zweiten Generation abgesenkt und somit noch flacher und weniger spürbar realisiert.

Durch optimierte Polierverfahren ist die Oberfläche nun spürbar glatter. Dies erhöht den Tragekonform und beugt darüber hinaus Plaqueanlagerungen sowie Schleimhautirritationen vor.

## Das Herz eines Brackets – die Prescription

Um modernste Brackettechnologie klinisch perfekt in Szene zu setzen, bedarf es einer Prescription, die ebenso modern ist. Ein Behandlungskonzept, das einerseits auf langjährigen Erfahrungen beruht und andererseits offen für klinische Fortschritte ist.


## Die FACE Evolution II Prescription

Natürlich schöne und stabile Ergebnisse

Die Arbeitsgemeinschaft international renommierter Kieferorthopäden vertritt einen Behandlungsansatz, der nicht nur die Harmonisierung von fazieller und dentaler Ästhetik sowie eine funktionale Okklusion zum Ziel hat. Er umfasst darüber hinaus die parodontale Gesundheit, eine orthopädisch stabile Kiefergelenkposition, freie Atemwege sowie stabile Ergebnisse.

Im Laufe vieler Jahre hat die FACE-Gruppe, deren FACE Evolution Prescription eine Aktualisierung der Roth-Technik darstellt, umfangreiche klinische Erfahrungen gesammelt. Mit FACE Evolution II ist nun die jüngste Modifikation verfügbar. Sie zeichnet sich durch geänderte Torquewerte der Brackets für die oberen und unteren Eckzähne und Prämolaren, sowie für die ersten und zweiten oberen Molare aus. So wurden diese bei den oberen 4ern und 5ern von bislang  $-7^\circ$  auf  $0^\circ$  geändert und bei den unteren Prämolaren von  $-17^\circ$  auf  $-12^\circ$  (1. Prämolare) sowie von  $-22^\circ$  auf  $-17^\circ$  (2. Prämolare). Die Grundlagen dieser Modifikationen wurden durch die Auswertung von CBCT Aufnahmen gewonnen, die vor und nach der Behandlung durchgeführt wurden. Diese Auswertung legt eine Änderung des Torques einiger Zähne nahe, um die Zahnwurzeln besser im Alveolarknochen zu positionieren und somit Dehiszenzen zu vermeiden und/oder die Stabilität und parodontale Gesundheit zu verstärken. Denn stehen die Wurzeln in ihrer natürlichen Position im Parodontium, trägt dies nicht nur zu stabileren, sondern auch zu ästhetischeren Ergebnissen bei.

Hintergrund dieser Anpassung ist der Wunsch eine anatomisch noch optimalere Zahnstellung bei gleichzeitiger Realisierung eines attraktiveren Lächelns zu erzielen.

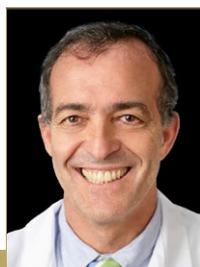

Dr. Domingo Martín



Dr. Jorge Ayala



Dr. Douglas Knight




Dr. Straty Righellis

Wir verstehen die Kieferorthopädie als eine Disziplin, deren Ziel neben der Verbesserung der Ästhetik eine umfassende Mundgesundheit ist. Aus diesem Grund sind wir stolz darauf Ihnen nun die neueste Generation der Mini Sprint II Brackets mit der FACE Evolution II Prescription vorstellen zu können.



## FACE Evolution II System – Mini Sprint® II Brackets

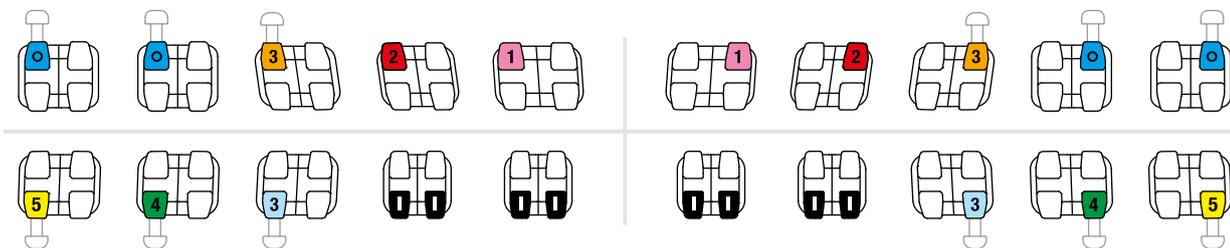

OK <span style="float:right">C € 0297</span>					Slot .018"		Slot .022"	
Zahn	Torque	Angulation	In/Out	Rotation	Rechts Artikel-Nr.	Links Artikel-Nr.	Rechts Artikel-Nr.	Links Artikel-Nr.
<b>1</b> Mittl. Schneidezahn	+12°	+5°	1,05	–	794-0103	793-0103	794-0101	793-0101
<b>2</b> Seitl. Schneidezahn	+8°	+9°	1,25	–	794-0203	793-0203	794-0201	793-0201
<b>3</b> Eckzahn	+3°	+8°	0,7	–	794-0313	793-0313	794-0311	793-0311
Eckzahn + Haken	+3°	+8°	0,7	–	794-0303	793-0303	794-0301	793-0301
<b>4</b> 1. Prämolare	0°	0°	0,85	–	794-0533	793-0533	794-0531	793-0531
1. Prämolare + Haken	0°	0°	0,85	–	794-0523	793-0523	794-0521	793-0521
<b>5</b> 2. Prämolare	0°	0°	0,85	–	794-0533	793-0533	794-0531	793-0531
2. Prämolare + Haken	0°	0°	0,85	–	794-0523	793-0523	794-0521	793-0521

UK <span style="float:right">C € 0297</span>					Slot .018"		Slot .022"	
Zahn	Torque	Angulation	In/Out	Rotation	Rechts Artikel-Nr.	Links Artikel-Nr.	Rechts Artikel-Nr.	Links Artikel-Nr.
<b>1</b> Mittl. Schneidezahn	-1°	0°	1,3	–	793-1303	793-1303	793-1301	793-1301
<b>2</b> Seitl. Schneidezahn	-1°	0°	1,3	–	793-1303	793-1303	793-1301	793-1301
<b>3</b> Eckzahn	-6°	+2°	0,6	–	794-1413	793-1413	794-1411	793-1411
Eckzahn + Haken	-6°	+2°	0,6	–	794-1403	793-1403	794-1401	793-1401
<b>4</b> 1. Prämolare	-12°	0°	0,65	–	794-1533	793-1533	794-1531	793-1531
1. Prämolare + Haken	-12°	0°	0,65	–	794-1523	793-1523	794-1521	793-1521
<b>5</b> 2. Prämolare	-17°	0°	0,65	–	794-1633	793-1633	794-1631	793-1631
2. Prämolare + Haken	-17°	0°	0,65	–	794-1623	793-1623	794-1621	793-1621

Fälle/Variationen	Slot .018"			Slot .022"		
	1	5	10	1	5	10
	706-1218	706-1219	706-1220	706-1227	706-1228	706-1229
3	706-1221	706-1222	706-1223	706-1230	706-1231	706-1232
3-5	706-1224	706-1225	706-1226	706-1233	706-1234	706-1235

## Größerer optionaler Torque an Front- und Seitenzähnen im Unterkiefer

UK <span style="float:right">C € 0297</span>					Slot .018"		Slot .022"	
Zahn	Torque	Angulation	In/Out	Rotation	Rechts Artikel-Nr.	Links Artikel-Nr.	Rechts Artikel-Nr.	Links Artikel-Nr.
<b>1+2</b> Mittl. + seitl. Schneidezahn	-6° *	0°	1,4	–	793-1203	793-1203	793-1201	793-1201

\*Durch eine 180°-Drehung beim Kleben kann der Torque von -6° auf +6° umgestellt werden. Bitte geben Sie an, ob Sie diese Option bevorzugen.