



2D[®] *Lingual Brackets*

¡Libertad para la lengua!


*Los brackets de más bajo perfil en el mercado
para la mejor comodidad del paciente*

FORESTADENT[®]
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS

2D® Brackets Linguales – Sencilla ortodoncia lingual



Los brackets linguales 2D® - de FORESTADENT son extremadamente planos, confortables y gracias a su sencilla técnica son ideales para quienes comienzan con la ortodoncia lingual, fáciles de manejar, a precios razonables y sin costos de laboratorio. Este sistema de brackets ofrece una rentable expansión a la oferta de su consulta con muy bajos costos.

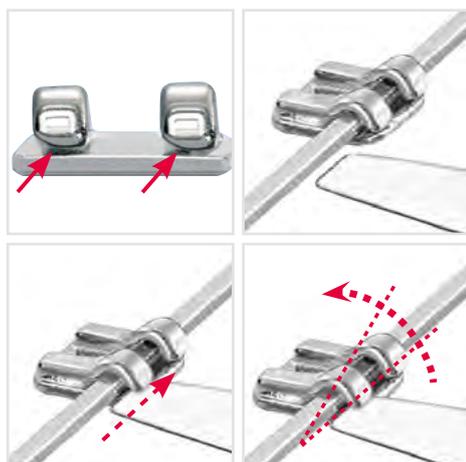


Sencillos de manejar

Los brackets linguales 2D® son notablemente sencillos de manejar. Debido a sus aletas autoligables el arco se puede insertar de manera fácil desde oclusal. El clip puede abrirse sencillamente desde oclusal con un explorador especial y cerrarse de nuevo con la pinza Weingart ultra ligera.

Clip

El clip optimizado asegura un mejor control del alambre y su fácil apertura. Se pueden utilizar alambres redondos con un diámetro máximo de .022”.

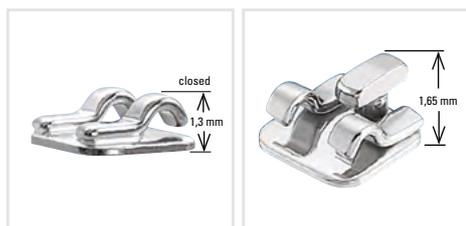

Diseño extremadamente plano

El espesor total de los brackets linguales 2D® es de 1.3 a 1.65 mm, incluyendo la base. Por esta razón, el paciente no tendrá dificultades al hablar.



Excelente biomecánica

El bracket se pega cerca del centro de resistencia y por lo tanto ofrece una excelente biomecánica para voltear y rotar los dientes. La primera fase del tratamiento puede por lo tanto lograrse notablemente rápido.



Nuevos tipos de Brackets

- Mini Ants para un mejor control de la rotación
- Los brackets 2D® con gancho – T para fijar las cadenas elásticas.
- Los brackets 2D® Plus para la aplicación de torque sobre un solo diente.
- Los brackets plus 2D® con gancho gingival para la aplicación de elásticos intermaxilares
- Tubo lingual con gancho para la aplicación de elásticos intermaxilares.



Casos clínicos

Caso 1: Dr. A. Gebhardt, Bad Wildungen, Alemania. Clase I con apiñamiento en maxilar superior e inferior.



Inicio



Después de 6 meses



Inicio



Después de 6 meses

Caso 2: Dr. V. Cacciafesta, Pavia, Italia.



Inicio



Después de 3 meses

Caso 3: Dr. V. Cacciafesta, Pavia, Italia.



Inicio



Después de 3 meses

Caso 4: Dr. V. Cacciafesta, Pavia, Italia. Clase I con apiñamiento en maxilar superior e inferior.



Inicio



Inicio



Después de 2 meses



Después de 4 meses



Después de 4 meses



Inicio



Después de 2 meses



Después de 4 meses

Caso 5: Dr. Karp, Múnich, Alemania. Clase I, mordida profunda y 11 y 21 en posición vertical/ligeramente retro-inclinados.



Inicio



Después de 5 meses



Inicio



Después de 3 meses

Caso 6: Dr. Geserick, Ulm, Alemania. Paciente con veneers para coronas clínicas extendidas y para elevar la mordida posterior.



Inicio



Después de 5 meses



Después de 7 meses



Inicio



Después de 5 meses



Después de 7 meses

Caso 7: Dr. B. Ludwig y Dr. B. Glasl, Traben-Trarbach, Alemania.



Incisorios superiores con aplicación de Torque individual con brackets 2D® plus.

Caso 8: Dr. V. Cacciafesta, Pavia, Italia. Brackets linguales 2D® Large Pad: Problemas de rotación y angulación en los incisivos superiores y los molares.



Inicio



Al cabo de tres meses (sin extracción)

Caso 9: Dr. V. Cacciafesta, Pavia, Italia. Brackets linguales 2D® Plus: Aplicación de torque en los incisivos superiores con casos de extracción y clase II, div. 2.



Inicio



Un año y tres meses (extracción de 15 y 25)


2D[®] Lingual Brackets

Order No.		Uso	Contenido	Tamaño	Descripción
760-1026		$\frac{54321}{54321} \mid \frac{12345}{12345}$	10	Gemelo mediano	Bracket lingual 2D[®] sin gancho, solo 1,3 mm de grosor
760-1126		$\frac{7654321}{7654321} \mid \frac{1234567}{1234567}$	10	Gemelo mediano	Bracket lingual 2D[®] con gancho gingival grande, solo 1,3 mm de grosor
763-1126		$\frac{54321}{54321} \mid \frac{12345}{12345}$	10	Gemelo mediano	Bracket lingual 2D[®] con gancho en T
761-1126		$\frac{54321}{54321} \mid \frac{12345}{12345}$	10	Gemelo mediano	Bracket lingual 2D[®] sin gancho para aplicar torque individual
762-1126		$\frac{54321}{54321} \mid \frac{12345}{12345}$	10	Gemelo mediano	Bracket lingual 2D[®] con gancho gingival para aplicar torque individual
760-1028		$\frac{321}{321} \mid \frac{123}{123}$	10	Único angosto	Bracket lingual 2D[®] sin gancho, solo 1,3 mm de grosor
760-1029		$\frac{21}{21} \mid \frac{12}{12}$	10	Gemelo angosto	Mini Ants para un mejor control de la rotación
760-1030		$\frac{21}{21} \mid \frac{12}{12}$	10	Gemelo angosto	Mini Ants con gancho para un mejor control de la rotación
760-1027		$\frac{7654}{7654} \mid \frac{1}{1} \mid \frac{4567}{4567}$	10	Gemelo grande	Bracket lingual 2D[®] sin gancho, solo 1,3 mm de grosor
760-1127		$\frac{7654}{7654} \mid \frac{1}{1} \mid \frac{4567}{4567}$	10	Gemelo grande	Bracket lingual 2D[®] con gancho gingival largo, solo 1,3 mm de grosor, extraancho, para un mayor control de la angulación y rotación
760-1032		$\frac{321}{321} \mid \frac{123}{123}$	10	Gemelo angosto	Mini-Ants para un mejor control de la rotación
760-1167		$\frac{76}{76} \mid \frac{67}{67}$	10	standard	Tubo lingual
760-2167		$\frac{76}{76} \mid \frac{67}{67}$	10		



Lingual Brackets – 1 case (20 Brackets, 5 - 5)

Order No.		Uso	Contenido	Tamaño	Descripción
706-0869		5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5	8x / 12x	Gemelo mediano	Bracket lingual 2D® con / sin gancho en T (12x 8x)
706-0874		5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5	20x	Gemelo mediano	Bracket lingual 2D® con gancho en T

Brackets Linguales – Starter surtidos

707-1503	<p>Starter surtido de Brackets Linguales 2D® con y sin ganchos en T</p> <p>Brackets Linguales 2D® - 5 casos (60 con ganchos en T, 40 sin ganchos en T), 1 Modelo de Brackets Linguales 2D® superior + inferior.</p>
707-1504	<p>Starter surtido de Brackets linguales 2D® con ganchos en T</p> <p>Brackets Linguales 2D® - 5 casos con ganchos en T (100 Brackets), 1 Modelo de Brackets Linguales 2D® superior + inferior.</p>
707-1505	<p>Starter surtido de Brackets Linguales 2D® mixto con gancho gingival grande</p> <p>Brackets Linguales 2D® - 5 casos (40 x 760-1026 Medium Twin, 40 x 760-1126 Medium Twin, 10 x 760-1027 Large Twin, 10 x 760-1028 narrow single), 1 Modelo de Brackets Linguales 2D® superior + inferior.</p>
	<p>Contenido adicional incluido en ambos surtidos:</p> <p>1 explorador especial con director</p> <p>1 alambre BioLingual® 0.010" – Forma 2</p> <p>1 alambre BioLingual® 0.010" – Forma 5</p> <p>1 alambre BioLingual® 0.012" – Forma 2</p> <p>1 alambre BioLingual® 0.012" – Forma 3</p> <p>1 alambre BioLingual® 0.012" – Forma 4</p> <p>1 alambre BioLingual® 0.012" – Forma 5</p> <p>1 alambre BioLingual® 0.016" - Forma 2</p> <p>1 alambre BioLingual® 0.016" – Forma 3</p> <p>1 alambre BioLingual® 0.016" – Forma 4</p> <p>1 alambre BioLingual® 0.016" – Forma 5</p> <p>Folleto Lingual 2D® para el paciente (aprox. 25 piezas)</p> <p>Plantilla para arcos BioLingual®</p>





Arcos BioLingual®

Tamaño	Perfil	Fuerza	Contenido						
				Shape 1	Shape 2	Shape 3	Shape 4	Shape 5	Shape 6
.010"	●	20 g	10	270-0125	270-0225	270-0325	270-0425	270-0525	270-0625
.012"	●	30 g	10	270-0130	270-0230	270-0330	270-0430	270-0530	270-0630
.014"	●	40 g	10	270-0135	270-0235	270-0335	270-0435	270-0535	270-0635
.016"	●	50 g	10	270-0140	270-0240	270-0340	270-0440	270-0540	270-0640

BioLingual® arcos – empaque combinado

Tamaño	Perfil	Fuerza	Order No.	Contenido			
				Shape 2	Shape 3	Shape 4	Shape 5
.012"	●	30 g	270-0030	2	3	3	2
.014"	●	40 g	270-0035	2	3	3	2
.016"	●	50 g	270-0040	2	3	3	2



Arcos Titanol®

	Tamaño	Calidad	Contenido	Order No.
	superior .012"	Titanol®	Titanol®	10
inferior .012"	10			272-0930
superior .014"	Titanol®	Titanol®	10	272-0835
inferior .014"			10	272-0935
superior .016"	Titanol®	Titanol®	10	272-0840
inferior .016"			10	272-0940
superior .016" x .016"	Titanol®	Titanol®	10	272-1440
inferior .016" x .016"			10	272-1540

Arcos Betaflex Titan

	Tamaño	Perfil	Contenido	Order No.
Alambres de Titanio Betaflex – rectos, 380 mm = 15" longitud	.016 x .022		10	220-4055

2D® Lingual Brackets Accesorios

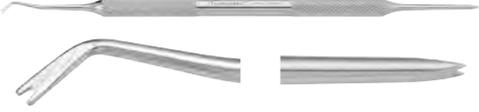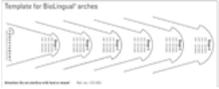Order No.		Contenido	Descripción	
655-0015		1 rollo	Cadena elástica lingual – más plana que las cadenas estándar	
501-0855		1	Tucker para alambres desinfectable, esterilizable	
501-0843		1	Explorador especial con director para abrir los brackets linguales 2D®	
501-0845		1	Pinzas para alambre Ultra livianas Weingart	
501-0223		1	Pinza para 2D® Lingual bracket – 3 mm	
501-0224		1	Pinza para 2D® Lingual bracket – 43 mm	
435-0005		1	Plantilla para arcos BioLingual®	
501-0863		1	Calibre para medir models de laboratorio con mina de grafito	
501-0879		10	Mina de recambio para calibre para medir modelos	

Accesorios

Order No.			Contenido	Descripción
para soldar	sul Pad			
760-0014	760-0614		10	Gancho lingual doble
760-0001	760-0801		10	Botones linguales de cuello corto
760-0002	760-0802		10	Botones linguales de cuello largo
760-0005	760-0805		10	Botones linguales , base grande contorneada

Order No.		Contenido	Descripción
760-0030		10	Cadena para liberar dientes retenidos. A medida que la pieza va a su posición, se van eliminando eslabones 
413-0011		50	Silicona medicinal para la aplicación temporal en caso de irritaciones provocadas por aparatos ortodóncicos
950-0212		1	Modelo de Brackets Linguales 2D®
760-0070		10	Almohadilla de retención lingual para la preparación individual de retenedores para aplicación directa sin ajuste previo en el modelo
261-4040	 Ø 0,40 mm = .016 inch	10	El alambre suave trenzado de 6 hilos es especialmente adecuado para fines de adaptación. Piezas de 355 mm / 14 „de largo



*Bernhard Förster GmbH · Westliche Karl-Friedrich-Straße 151 · 75172 Pforzheim · Germany
Phone + 49 7231 459-0 · Fax + 49 7231 459-102 · info@forestadent.com · www.forestadent.com*

FORESTADENT de España, S.L.U.

Oficina Madrid: General Rodrigo 6 · Edificio Germania, 7ª Planta · E-28003 Madrid

Phone: +34 915 34 55 53 (directo) · Phone: +34 915 33 16 17 (oficina)

Fax: +34 915 33 15 67 · forestadent@forestadent.es

Oficina Barcelona: Passeig dels Ferrocarrils Catalans 97-117

Planta 3 / Oficina 27 · E-08940 Cornellà de Llobregat

Phone: +34 93 215 30 61 · Fax: +34 93 215 96 38 · forestadent.bcn@forestadent.es

**FORESTADENT**[®]
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS