



AquaSplint® Thermo und Mini –

férulas oclusales autoajustables y a medida para CMD

Las ventajas en comparación con las férulas oclusales clásicas

 Rápido alivio del dolor y relajación muscular	 Posibilidad de uso inmediato sin necesidad de trabajos de laboratorio	 Tamaño universal que permite un uso universal	 Ajuste cómodo y preciso
 Suficiente con un uso de 10 horas por día durante 4 semanas	 Sin necesidad de citas para realizar ajustes (gracias al sistema de compensación hidro-stática de ambas almohadillas de agua)	 Reemplaza a las férulas de relajación y distracción	 Puede colocarse durante un tratamiento de ortodoncia



Las AquaSplint® Thermo y Mini son férulas prefabricadas autoajustables y a medida para tratar CMD que pueden utilizarse en pocos minutos sin necesidad de trabajos en laboratorio, impresiones o registros. Constan de dos almohadillas de agua conectadas por un tubo (equilibrio hidrostático).



Utilizable también durante tratamientos de ortodoncia (brackets / alineadores).

1. AquaSplint® Thermo con brackets
2. AquaSplint® Thermo con alineadores
3. AquaSplint® Mini con brackets



La diferencia entre las AquaSplint® Thermo y Mini

AquaSplint® Thermo	AquaSplint® Mini
3 mm de altura: óptima para pacientes con sobremordida	1,5 mm de altura: óptima para pacientes con mordida borde a borde / mordida abierta
Se personaliza mediante el rebase colocado debajo de la asiento	No tiene asiento ni rebase, y se personaliza por medio de la adaptación del arco de acero del tubo

Indicaciones:

1. Rápido alivio del dolor y relajación muscular
2. Tratamiento inicial óptimo en caso de CMD
3. Diagnóstico diferencial de la génesis multifactorial de la CMD
4. Terapia complementaria en caso de enfermedades, como cervicalgia, tinnitus, migrañas, estrés, traumatismos, operaciones, limitaciones y bloqueos (la CMD tiene una génesis multifactorial, la maloclusión no siempre es la causa principal)
5. Determinación simple de la mordida antes de la aplicación de prótesis o tratamientos de ortodoncia
6. Neutraliza disfunciones, contactos prematuros, oclusiones forzadas

Contraindicaciones:

1. El bruxismo o el rechinaro fuertes disminuyen su vida útil
2. Los bordes afilados de prótesis, coronas o similares, pueden dañar las almohadillas de agua (puede ayudar una lámina de termoformado con un espesor de 0,5 mm en el maxilar opuesto)
3. Falta de muelas; debe haber, como mínimo, un segundo premolar (5.º) en cada cuadrante

Detalles del pedido

N.º de artículo	Contenido	Descripción
406-0001	1	AquaSplint® Mini
406-0002	1	AquaSplint® Thermo

Inventor:

Dr. Aladin Sabbagh



Fabriacante:

PLASTYLE GmbH
Lessingstraße 5
91080 Uttenreuth
Teléfono: +49 (0)9131 9402406
info@plastyle.de

Distribuido por:

FORESTADENT SLU (España)

Oficina Madrid
General Rodrigo 6
Edificio Germania, 7ª Planta
28003 Madrid
Phone: +34 915 34 55 53 (directo)
Phone: +34 915 33 16 17 (oficina)
Fax: +34 915 33 15 67
forestadent@forestadent.es

Distributed by:

FORESTADENT

Bernhard Förster GmbH
Westliche Karl-Friedrich-Str. 151
75172 Pforzheim (Germany)
Teléfono: +49 (0) 7231 459-0
Fax: +49 (0) 7231 459-102
www.forestadent.com
info@forestadent.com