

# Notwendige Informationen für die Erstellung eines Behandlungsvorschlags mit Accusmile®

Um für Ihren Patienten einen möglichst optimalen Behandlungsvorschlag erstellen zu können, benötigen wir in jedem Fall folgende Informationen von Ihnen:


## 1. Aufnahmen mit dreidimensionaler Kopfpositionierung



## 2. Aufnahme von vorne mit Lächeln




## 3. Röntgenübersichtsaufnahme und Fernröntgenseitenbild in einwandfreier Bildqualität und ohne Positionierungsfehler bei der Aufnahme. Die Fernröntgenseitenaufnahme sollte die Weichteilkontur des Gesichtes deutlich wiedergeben.

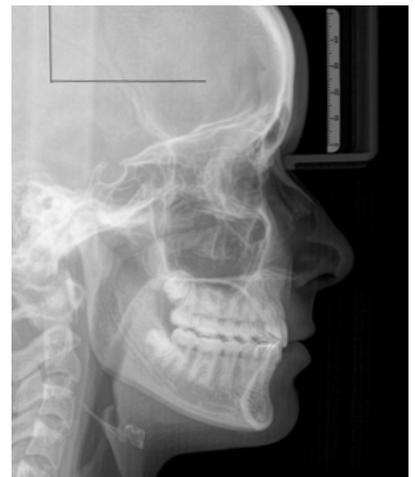

#### 4. Kieferorthopädisches Gipsmodell oder alternativ 3D Scandaten

Bei Gipsmodellen müssen die für Techniker gültigen Normen erfüllt werden. Neben den Zähnen müssen Tuber, Alveolarfortsätze und Bänder gut dargestellt sein. Bitte achten Sie auf eine präzise dreidimensionale Orientierung beim Trimmen, da es ansonsten leicht zu einer Fehlinterpretation der Okklusion kommen kann.

**Wichtig:** Um einen Behandlungsvorschlag zu erstellen, müssen beide Kieferhälften sowie eine Bissregistrierung vorliegen.

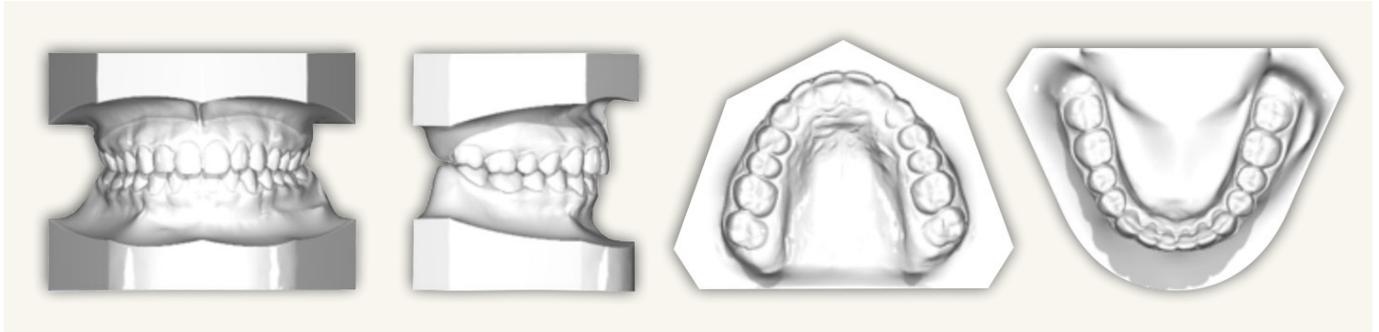

#### 5. Intraoraler Fotostatus

Hier gilt es besonders auf die Aufnahme der rechten und der linken Seite zu achten, idealerweise werden diese Aufnahmen unter Zuhilfenahme eines Fotospiegels erstellt. Der Fokus der Fotografie sollte hier auf den hinteren Prämolaren liegen. Für eine hochwertige Anfertigung von intraoralen Bildern empfehlen wir die Verwendung einer Spiegelreflexkamera mit Ring.

